



# Manuale per la gestione delle protesi acustiche

BTE Tubetto

**Gentile Cliente,  
Congratulazioni per il tuo nuovo acquisto!**

Questo breve libretto d'uso e manutenzione ti aiuterà a mantenere i tuoi apparecchi efficienti, per un'esperienza acustica sempre ottimale e più duratura nel tempo.


Per qualunque dubbio telefona al  
Numero Verde gratuito

**800 034 527**

oppure vieni a trovarci in uno dei nostri centri di

**Biella - Castellamonte - Vercelli**

# Manuale per la gestione delle protesi acustiche

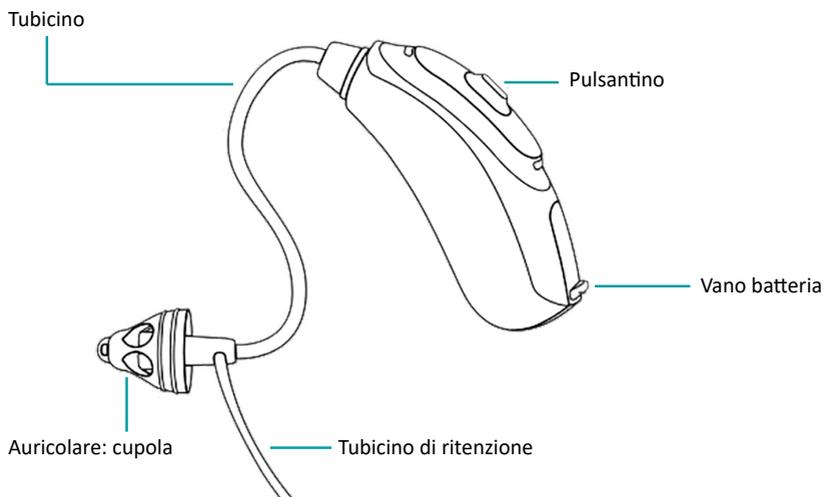

## Come distinguere apparecchio destro e sinistro

Per distinguere l'apparecchio destro da quello sinistro bisogna guardare il colore del contrassegno:

- il contrassegno **BLU** indica l'apparecchio **SINISTRO**
- il contrassegno **ROSSO** indica l'apparecchio **DESTRO**

**N.B.:** anche i tubicini sono dotati di contrassegni **ROSSO** e **BLU**


SI CONSIGLIA DI FISSARE UN APPUNTAMENTO PER LA  
REVISIONE PERIODICA DEI VOSTRI APPARECCHI  
OGNI 4 MESI (CAMBIO TUBICINI E PULIZIA).

## Operazioni di pulizia apparecchi

Svitare il tubicino dall'apparecchio (è consigliabile effettuare tale operazione prima su un apparecchio e poi sull'altro per evitare di confondere l'apparecchio destro con il sinistro).



Ispezionare il tubicino, verificando che non siano presenti goccioline di acqua (sudore, condensa, umidità). Per rimuoverle usare una pompetta ad aria.

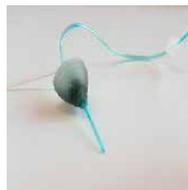

Far passare il filetto verde per tutta la lunghezza del tubicino partendo dal punto in cui si aggancia all'apparecchio fino a farlo uscire dalla cupolina (fare attenzione di spostare bene l'anellino paracerume sulla punta della cupolina).



Sempre con il filetto verde togliere eventuali residui dall'anellino in cima alla cupolina.

Riavvitare il tubicino sull'apparecchio (occorrono due rotazioni complete). Fermarsi quando la parte lunga del tubicino risulta parallela all'apparecchio.



SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE QUESTE OPERAZIONI DI PULIZIA ALMENO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, ANCHE SE LE PROTESI FUNZIONANO CORRETTAMENTE.

## Sostituzione batteria

Rimuovere l'adesivo dalla pila (si consiglia di aspettare un paio di minuti prima di inserirla nell'apparecchio accertandosi che non vi siano rimasti residui di colla).

Aprire il cassetto del vano batteria.

Togliere la pila scarica e smaltirla negli appositi contenitori per le pile.

Inserire la pila con il simbolo + a vista (la parte liscia della pila).

Chiudere il cassetto (in questo modo l'apparecchio si accenderà).

Per spegnerlo basterà aprire il cassetto quanto basta per scollegare il contatto dalla pila.

**N.B. Se si avverte una certa resistenza alla chiusura del cassetto, controllare che la pila sia inserita correttamente. Se la batteria viene inserita in modo scorretto l'apparecchio acustico non funziona e potrebbero danneggiarsi i contatti della pila.**

## Cosa fare se gli apparecchi non emettono nessun suono

Controllare che la pila sia carica (se il problema si pone solo su uno dei due apparecchi è consigliabile inserire la pila dell'apparecchio funzionante in quello muto, se questo comincia a funzionare la pila precedentemente usata potrebbe essere scarica).

Se il problema persiste, svitare il tubicino dall'apparecchio e avvicinarlo all'orecchio avvolgendolo con la propria mano.

Si possono verificare due casi:

**1. L'apparecchio, chiuso in una mano, emette suono (fischia):** eseguire una completa operazione di pulizia del tubicino. Qualora continuasse a non funzionare rivolgersi all'audioprotesista.

**2. L'apparecchio, chiuso in mano, continua a non emettere alcun suono:** rivolgersi subito all'audioprotesista per capire il difetto dello strumento.



## Prodotti per la pulizia

Per funzionare correttamente, gli apparecchi acustici e gli auricolari devono essere puliti quotidianamente.

Per facilitare le operazioni di pulizia si possono utilizzare appositi prodotti, che garantiscono il perfetto funzionamento delle protesi, senza danneggiarle.

**Spray o salviette detergenti:** ideali per la pulizia esterna e la disinfezione di apparecchi acustici e auricolari. Assicurano protezione contro batteri e funghi, riducendo il rischio di infezioni e infiammazioni dell'orecchio.

**Capsule deumidificanti:** consigliate soprattutto nei mesi più caldi, ma ideali durante tutto l'anno, le capsule deumidificanti aiutano a mantenere sempre asciutti i vostri apparecchi. Dopo averla estratta dalla confezione, posizionare la capsula e le protesi nell'apposito **contenitore per l'asciugatura**, assicurandosi di chiudere sempre bene il coperchio ermetico.

La capsula cambia colore, passando dall'arancione al bianco, segnalando così che è ora di sostituirla con una nuova.

L'ideale sarebbe lasciar asciugare le protesi per tutta la notte, riducendo così i problemi causati dall'umidità.

**N.B: L'uso di solventi, detersivi o alcool non adatti potrebbe danneggiare le protesi!**

FARSI SEMPRE CONSIGLIARE DAL CENTRO ACUSTICO DI FIDUCIA I PRODOTTI PIU' ADATTI ALLE PROPRIE PROTESI E COME UTILIZZARLI NEL MODO CORRETTO.

**Acustica Biellese**  
*Un team sempre al tuo fianco...*





**Acustica Biellese S.r.l.**  
Biella | Castellamonte | Vercelli  
Numero verde gratuito **800 034 527**  
[info@acusticabiellese.com](mailto:info@acusticabiellese.com)  
[www.acusticabiellese.com](http://www.acusticabiellese.com)