



# Manuale per la gestione delle protesi acustiche

Non ricaricabili con ricevitore nel canale

**Gentile Cliente,  
Congratulazioni per il tuo nuovo acquisto!**

Questo breve libretto d'uso e manutenzione ti aiuterà a mantenere i tuoi apparecchi efficienti, per un'esperienza acustica sempre ottimale e più duratura nel tempo.


Per qualunque dubbio telefona al  
Numero Verde gratuito

**800 034 527**

oppure vieni a trovarci in uno dei nostri centri di

**Biella - Castellamonte - Vercelli**

# Manuale per la gestione delle protesi acustiche

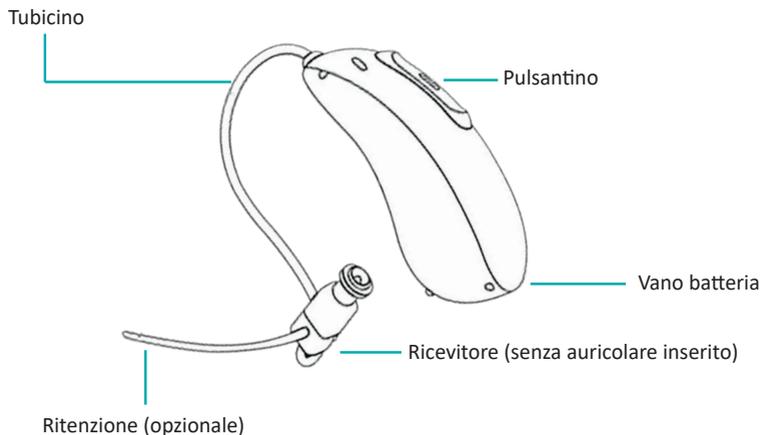

## Come distinguere apparecchio destro e sinistro

Per distinguere l'apparecchio destro da quello sinistro bisogna guardare il colore del contrassegno:

- il contrassegno **BLU** indica l'apparecchio **SINISTRO**
- il contrassegno **ROSSO** indica l'apparecchio **DESTRO**

**N.B.** Anche i ricevitori sono dotati di contrassegni **SINISTRO** e **DESTRO**.

SI CONSIGLIA DI FISSARE UN APPUNTAMENTO  
PER LA REVISIONE PERIODICA DEI  
VOSTRI APPARECCHI OGNI 4 MESI.

## Operazioni di pulizia degli apparecchi

**N.B. Consigliamo di eseguire le operazioni di manutenzione con l'apparecchio appoggiato su un piano e preferibilmente al mattino, quando il cerume è più secco.**

Pulire il foro in cima alla cupolina passando il filo di nylon verde.

Tenendo ben saldo il ricevitore tra le due dita, tirare delicatamente la cupolina e rimuoverla.

Pulire la punta del ricevitore con lo spazzolino.




## Come cambiare il paracerume: (Cerushield disk®).

**A.** Ruotare delicatamente il disco nella direzione delle frecce, finché non appare un'apertura libera sotto il disegno della pattumiera con il numero.

**B.** Per **togliere** il vecchio paracerume, inserire con cautela il ricevitore nell'apertura libera contrassegnata dal numero 1 fino a sentire un clic.

**C.** Per **inserirne** uno nuovo, ripetere lo stesso procedimento nell'apertura dove si vede il nuovo paracerume (puntino bianco) fino a sentire un clic. Avremo la certezza di aver sostituito correttamente il paracerume quando vedremo lo spazio **1 occupato** e lo spazio **2 libero**.

**D.** Inserire di nuovo la cupolina nel ricevitore. ATTENZIONE: il ricevitore e la cupolina devono combaciare perfettamente.

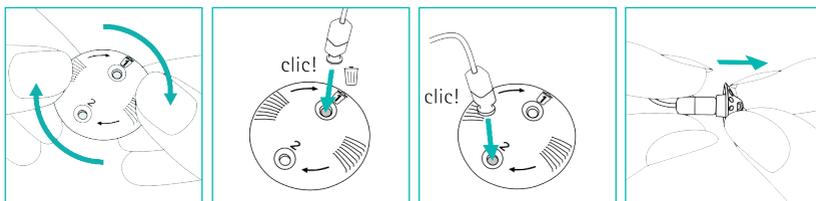

## Sostituzione batteria

Rimuovere l'adesivo dalla pila (si consiglia di aspettare un paio di minuti prima di inserirla nell'apparecchio accertandosi che non vi siano rimasti residui di colla).

Aprire il cassetto del vano batteria.

Togliere la pila scarica e smaltirla negli appositi contenitori per le pile.

Inserire la pila con il simbolo + a vista (la parte liscia della pila).

Chiudere il cassetto (in questo modo l'apparecchio si accenderà).

Per spegnerlo basterà aprire il cassetto quanto basta per scollegare il contatto dalla pila.

**N.B. Se si avverte una certa resistenza alla chiusura del cassetto, controllare che la pila sia inserita correttamente. Se la batteria viene inserita in modo scorretto l'apparecchio acustico non funziona e potrebbero danneggiarsi i contatti della pila.**

## Cosa fare se gli apparecchi non emettono nessun suono

**1. L'apparecchio, chiuso in una mano, emette suono (fischia) ma non amplifica:** eseguire una completa operazione di pulizia del ricevitore. Qualora continuasse a non funzionare rivolgersi all'audioprotesista.

**2. L'apparecchio, chiuso in mano, NON emette alcun suono (non fischia):** rivolgersi subito all'audioprotesista per capire il difetto dello strumento.

NON AFFERRARE MAI LA PROTESI DAL RICEVITORE,  
EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE  
CON GLI APPARECCHI APPOGGIATI SU UN PIANO.



## Raccomandazioni

Non indossare le protesi dal parrucchiere o mentre ci si pettina i capelli.

Se si utilizza la lacca per capelli, togliere le protesi al momento dell'uso.

Fare in modo di non bagnare le protesi.

Non utilizzare detergenti quali detersivi, alcool e solventi, potrebbero danneggiare le protesi.

## Prodotti per la pulizia

FARSI SEMPRE CONSIGLIARE DAL CENTRO ACUSTICO DI  
FIDUCIA I PRODOTTI PIU' ADATTI ALLE PROPRIE PROTESI  
E COME UTILIZZARLI NEL MODO CORRETTO.

**Acustica Biellese**  
*Un team sempre al tuo fianco...*





**Acustica Biellese S.r.l.**  
Biella | Castellamonte | Vercelli  
Numero verde gratuito **800 034 527**  
[info@acusticabiellese.com](mailto:info@acusticabiellese.com)  
[www.acusticabiellese.com](http://www.acusticabiellese.com)