



# Manuale per la gestione delle protesi acustiche

Ricaricabili con ricevitore

**Gentile Cliente,  
Congratulazioni per il tuo nuovo acquisto!**

Questo breve libretto d'uso e manutenzione ti aiuterà a mantenere i tuoi apparecchi efficienti, per un'esperienza acustica sempre ottimale e più duratura nel tempo.


Per qualunque dubbio telefona al  
Numero Verde gratuito

**800 034 527**

oppure vieni a trovarci in uno dei nostri centri di

**Biella - Castellamonte - Vercelli**

# Manuale per la gestione delle protesi acustiche

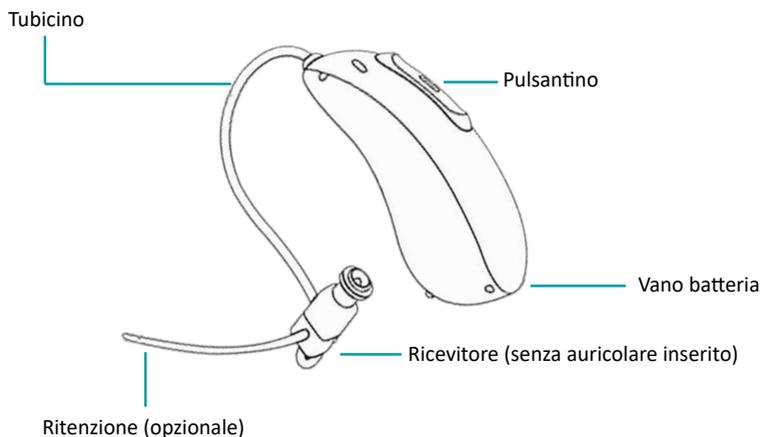

## Come distinguere apparecchio destro e sinistro

Per distinguere l'apparecchio destro da quello sinistro bisogna guardare il colore del contrassegno:

- il contrassegno **BLU** indica l'apparecchio **SINISTRO**
- il contrassegno **ROSSO** indica l'apparecchio **DESTRO**

**N.B.** Anche i ricevitori sono dotati di contrassegni **SINISTRO** e **DESTRO**.

SI CONSIGLIA DI FISSARE UN APPUNTAMENTO  
PER LA REVISIONE PERIODICA DEI  
VOSTRI APPARECCHI OGNI 4 MESI.

## Operazioni di pulizia degli apparecchi

Eeguire le operazioni di manutenzione con l'apparecchio appoggiato su un piano.

Tenendo ben saldo il ricevitore tra le due dita, tirare delicatamente la cupolina e rimuoverla.




Spazzolare la punta del ricevitore con lo spazzolino.

Togliere il vecchio paracerume dal ricevitore con lo strumento di sostituzione (CERUSTOP), incastrandone la punta al paracerume usato e tirando delicatamente.




Inserire il nuovo paracerume, che si trova sul lato opposto dello strumento di sostituzione.

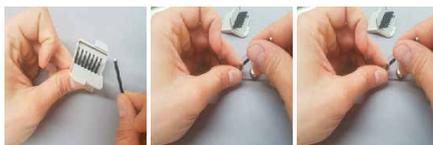

Inserire di nuovo la cupolina nel ricevitore.

**ATTENZIONE: il ricevitore e la cupolina devono combaciare perfettamente.**


**NON AFFERRARE MAI LA PROTESI DAL RICEVITORE,  
EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE  
CON GLI APPARECCHI APPOGGIATI SU UN PIANO.**

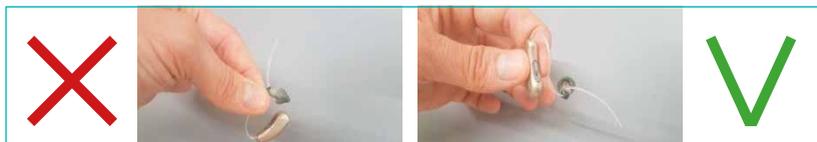

## Messa in carica delle protesi

Collegare il caricatore alla corrente e assicurarsi che il led posto nella parte posteriore vicino allo spinotto sia illuminato di **VERDE**.

Inserire gli apparecchi nei vani di carica rispettando gli indicatori **DX** e **SX** presenti sul caricatore.

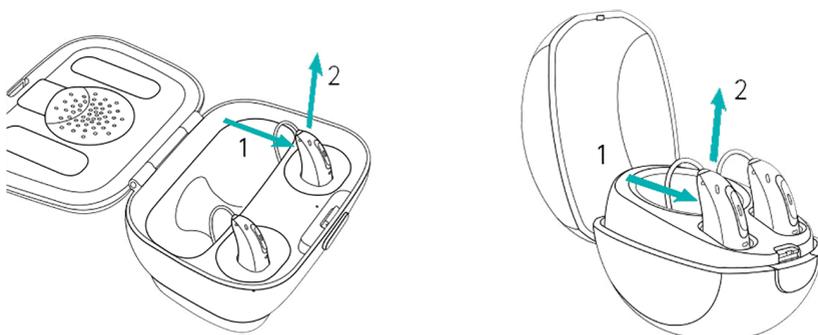

## Tempi di ricarica

Indicatore Led	Stato della carica	Tempi di carica
● ● ●	0-10%	30 min (30%)
● ● ●	11-80%	60 min (50%)
● ● ●	81-99%	90 min (80%)
■	100%	3 ore

Il processo di carica si interromperà automaticamente quando le batterie saranno completamente cariche, quindi gli apparecchi possono essere lasciati nel caricatore in sicurezza.

Gli apparecchi si spengono automaticamente quando messi in carica e si accendono una volta rimossi dal caricatore.

**ATTENZIONE: non scollegare la presa di corrente quando gli apparecchi sono inseriti nel caricatore altrimenti, accendendosi, perderanno la carica.**

## Cosa fare se gli apparecchi non emettono nessun suono

Controllare che la pila o l'apparecchio siano carichi.

Sostituire il paracerume con l'apposito strumento di sostituzione (CERUSTOP).

- 1. L'apparecchio, chiuso in una mano, emette suono (fischia):** Eseguire una completa operazione di pulizia del ricevitore. Qualora continuasse a non funzionare rivolgersi all'audioprotesista.
- 2. L'apparecchio, chiuso in mano, NON emette alcun suono (non fischia):** rivolgersi subito all'audioprotesista per capire il difetto dello strumento.

## Prodotti per la pulizia

**Per funzionare correttamente, gli apparecchi acustici e gli auricolari devono essere puliti quotidianamente. Per facilitare le operazioni di pulizia si possono utilizzare appositi prodotti, che garantiscono il perfetto funzionamento delle protesi, senza danneggiarle.**

**Cerumestop:** strumenti per la sostituzione del paracerume.

**Capsule deumidificanti:** consigliate soprattutto nei mesi più caldi, ma ideali durante tutto l'anno, le capsule deumidificanti aiutano a mantenere sempre asciutti i vostri apparecchi. Dopo averla estratta dalla confezione, posizionare la capsula e le protesi nell'apposito **Contenitore per l'asciugatura**, assicurandosi di chiudere sempre bene il coperchio ermetico. La capsula cambia colore, passando dall'arancione al bianco, segnalando così che è ora di sostituirla con una nuova. L'ideale sarebbe lasciar asciugare le protesi per tutta la notte, riducendo così i problemi causati dall'umidità.

**Spray o salviette detergenti:** ideali per la pulizia esterna e la disinfezione di apparecchi acustici e auricolari. Assicurano protezione contro batteri e funghi, riducendo il rischio di infezioni e infiammazioni dell'orecchio.

**N.B: L'uso di solventi, detersivi o alcool non adatti potrebbe danneggiare le protesi!**

FARSI SEMPRE CONSIGLIARE DAL CENTRO ACUSTICO DI  
FIDUCIA I PRODOTTI PIU' ADATTI ALLE PROPRIE PROTESI  
E COME UTILIZZARLI NEL MODO CORRETTO.

**Acustica Biellese**  
*Un team sempre al tuo fianco...*





**Acustica Biellese S.r.l.**  
Biella | Castellamonte | Vercelli  
Numero verde gratuito **800 034 527**  
[info@acusticabiellese.com](mailto:info@acusticabiellese.com)  
[www.acusticabiellese.com](http://www.acusticabiellese.com)